



NOVAPED exclusive

by schein



Handmade in Germany
www.schein-exclusive.de



individuell · elegant · exklusiv





Millionen Kombinationen – Individualität für Ihre Füße

Den eigenen individuellen Abdruck seiner Füße im Sand kennt jeder. Das Gefühl von Barfußlaufen auf einem weichen Untergrund ruft bei vielen Menschen Entspannung und Wohlbefinden hervor.

Dieses Empfinden spiegeln auch die **NovaPED exclusive** Zehenstegsandalen wider. Anders als gewöhnliche Zehenstegsandalen bieten die Maßsandalen **NovaPED exclusive**, auf Grund ihres anatomischen Fußbettes, dem Fuß genügend Halt und Unterstützung, gleichzeitig schaffen sie Komfort und Bequemlichkeit.

Das Gesamtkonzept überzeugt aber nicht nur durch den Tragekomfort: Individuelle Designwünsche, wie zum Beispiel exklusive Swarovski® Steine, Futter aus Lammfell oder einer Lasergravur im Deckenbezug der Sandale sind nur einige von vielen besonderen Extras.

Individuell, elegant und exklusiv:

Ein maßgefertigtes Gesamtkonzept, das durch ein qualitativ hochwertiges Produkt überzeugt und den individuellen Geschmackswünschen der Kunden entspricht.

NovaPED exclusives sind Zehenstegsandalen für Menschen, die nicht auf Gehkomfort verzichten möchten, das Exklusive lieben und ihren Füßen etwas Gutes tun wollen.



Wie kann ich für meine Kunden Modelle von NovaPED exclusive bestellen? Was brauche ich dafür?

Ihr Kunde sollte sich am besten sein persönliches Design vorab im Internet zusammenstellen. Dies erfolgt über den Konfigurator, den er über unsere Website www.schein-exclusive.de aufrufen kann.

Anschließend kommt der technische Part von Ihrer Seite, für den es drei verschiedene Möglichkeiten gibt, wie Sie das Fußbett bestellen können:

- Wellness Standard Fußbett nach Schablonen
- Sie schicken uns einen Trittschaum oder Scann als JPG-Datei und wir konstruieren für Sie ein Wellness-Fußbett
- Sie konstruieren selbst über unsere kostenlose Software SCHEINWORKS construction

Wellness Standard Fußbett nach Schablonen

Es besteht die Möglichkeit ohne Fußscann-System oder Trittschaum-Abdruck **NovaPED exclusive** Zehensteg-Sandalen zu bestellen. Bei einer Schablonen-Bestellung wird ein Standard-Fußbett produziert und geliefert. Zur Produktion wird die Farbzusammenstellung aus dem Konfigurator benötigt.



Weiterhin muss die gewünschte Größe, Riemenbreite und der Schablonen-Umriss angegeben werden. Bitte nutzen Sie dafür unser Formular, Kundenbestellung nach Schablone. Das Formular finden Sie auf unserer Webseite www.schein-exclusive.de im Bereich Download zum ausdrucken.

Zur Ermittlung der Größe und Breite sind Klarsichtschablonen verfügbar, die zum Selbstkostenpreis bezogen werden können. Die Schablonen sind in zwei Breiten erhältlich und entsprechen Original-Liefergröße und – breite.

Schablonensätze:

Artikel-Nr. 96 9311-000, schmaler Satz, bestehend aus je 1 Stück, Gr. 35 – 43

Artikel-Nr. 96 9313-000, breiter Satz, bestehend aus je 1 Stück, Gr. 38 – 48



Wellness Fußbett, über unser CAD-System SCHEINWORKS construction per Trittschaumabdruck oder Scann – genannt MEASURE

Wenn Sie kein Standard Fußbett bestellen möchten, können Sie entweder selbst oder von uns ein individuelles Fußbett per SCHEINWORKS construction konstruieren (lassen). Für das Wellness Fußbett mit moderaten Elementen (MEASURE) benötigt man eine JPG-Datei von einem Scann oder einem Trittschaumabdruck.



Mit Measure haben Sie die folgenden Möglichkeiten:

- Konstruktion eines individuellen bequemen Wellness-Fußbetts
- Moderat anpassbare Konstruktionselemente im Konstruktionsprogramm
- Erhältlich als Bausatz oder Fertigmodell, das in drei Weiten im Konstruktionsbereich (siehe Maßtabelle) angeboten wird

Wenn wir für Sie konstruieren sollen, brauchen wir zusätzlich zum Scann oder Trittschaum das Bestellformular nach Trittschaum und die Farbkonfiguration aus dem **NovaPED exclusive** Konfigurator. Soll eine Endmontage durch uns erfolgen, benötigen wir außerdem die Fußmaße Ihres Kunden. Eine Endmontage durch uns ist allerdings nur im Rahmen physiologischer Füße möglich. Das Formular und die Maßanleitung finden Sie auf www.schein-exclusive.de im Bereich Download zum ausdrucken.

Fußbett mit orthopädischen Elementen, über unser CAD-System SCHEINWORKS construction, per Scann - genannt KIT

Das Wellness Fußbett mit orthopädischen Elementen können nur Sie selbst konstruieren. Sie müssen also selbst die Bilddaten in SCHEINWORKS construction importieren und wie gewünscht konstruieren.



Mit KIT haben Sie die folgenden Möglichkeiten:

- Konstruktion eines individuellen Fußbetts
- Größere Auswahl an Konstruktionselementen und deren Dimensionierung
- Nur als Bausatz erhältlich



Wie funktioniert das Messsystem für Fertigmamodelle von NovaPED exclusive?

Wenn die Montage des Riemchens durch uns erfolgen soll, benötigen wir dafür die Maße des Kunden. Eine Endmontage durch uns ist nur im Rahmen physiologischer Füße möglich.

Schritt 1: Maße nehmen

Insgesamt sind an jedem Fuß zwei Maße in mm zu nehmen. Das Ballenmaß (A) wird am belasteten Fuß vom Mittelfußknochen 1 zum Mittelfußknochen 5 bestimmt.

Das Vorspannmaß (B) wird am belasteten Fuß 25 bis 30 mm hinter dem Ballenmaß an der schmalsten Stelle des Fußes bestimmt.

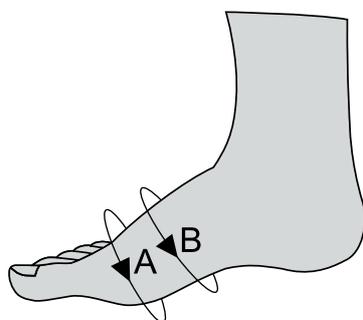


Abbildung 1: Ballenmaß (A) und Vorspannmaß (B)

Schritt 2: Ermittlung des Mittelwertes


Für die weitere Berechnung sind die Maße des voluminöseren Fußes zu wählen. Bei abweichenden Werten von mehr als 10 mm zwischen linken und rechten Fuß wird ein Bausatz empfohlen.

Die Leistenweite ist wie folgt zu berechnen:
 $(\text{Ballenmaß} + \text{Vorspannmaß}) : 2 = \text{Mittelwert}$

Schritt 3: Auswahl der Weite

Der errechnete Mittelwert (MW) dient zur Auswahl zwischen den Weiten S, M und W. Sie finden die Auswahl in SCHEINWORKS construction auf der Zusammenfassungsseite bevor die Bestellung abgeschickt wird. Es ist immer eine Weite zu wählen, die größer dem errechneten Wert MW ist. Ist der errechnete Mittelwert größer als die Leistenweite W, kann nur ein Bausatz für die optimale Passform benutzt werden.

Unsere Maßanleitung finden Sie ebenfalls zum Download auf www.schein-exclusive.de

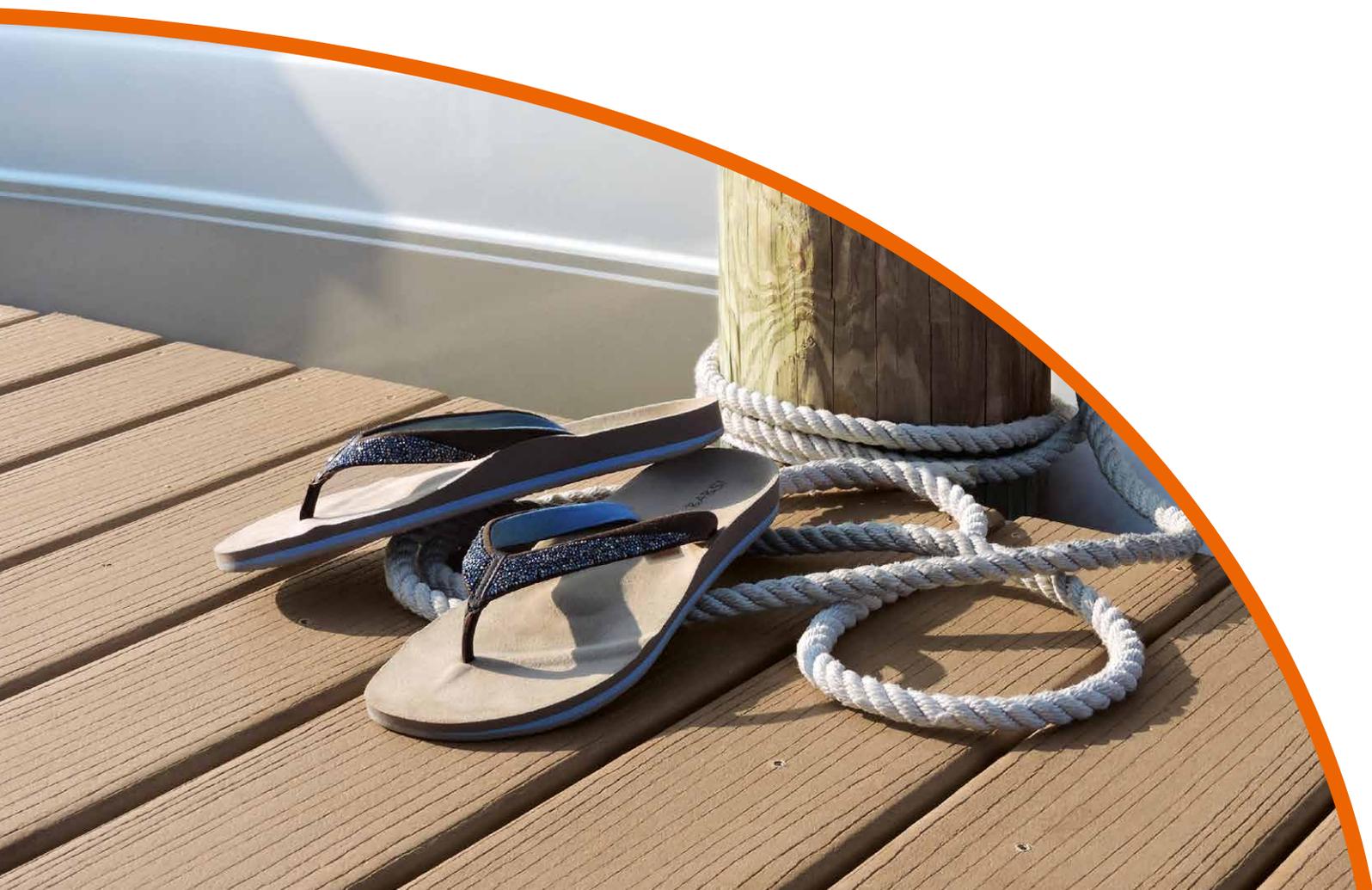

Wie entsteht ein Paar NovaPED exclusive?

Wenn wir Ihre Bestellung auf einem der genannten Wege erhalten haben, beginnt unsere Produktion:

Mittels modernster CNC-Frästechnologie gepaart mit liebevoller Handarbeit, hochwertigen Ledern und Materialien entsteht ein maßgefertigtes erstklassiges Produkt – Made in Germany.



Die besondere Anatomie des Fußbettes stützt nicht nur das Längsgewölbe, sie bettet auch die Ferse entsprechend, damit das typische Übertreten verhindert wird.

Bei Bedarf erfolgt die Montage und Anpassung des Riemchens durch Sie, unsere **NovaPED exclusive** Partner, direkt an den Füßen Ihres Kunden.



Tragekomfort und Design auf höchstem Niveau

Deckenbezug

kann aus Alcantara, Teddyfell oder Fell im Zebra Look gewählt werden. Bei vielen Deckenbezügen können Sie sich beispielsweise Ihre Initialen oder Namen eingravieren lassen. Damit runden Sie die persönliche Note Ihres Modells ab.

Lauffläche

das individuell konstruierte Fußbett bietet extrem hohen Gehkomfort und ist wohltuend für Füße und Beine und steht damit für ein ermüdungsfreies Gehen

Laufsohle

bietet dank des rutschhemmenden Profils optimalen Grip

Riemchen

in unterschiedlichen Breiten, Leder außen und Mikrofaserstoffe innen können im Konfigurator individuell zusammengestellt werden. Die haut-sympathische, weiche Polsterung sorgt für angenehmen Tragekomfort

Zehensteg

angepasst auf Ihren Fußabdruck für einen optimalen und angenehmen Halt zwischen den Zehen

Zwischenlage

fixiert die Enden des Zehenstegs und der Riemchen und sorgt gleichzeitig für eine größere Festigkeit und höhere Dämpfung beim Gehen. Darüber hinaus sorgt sie immer für einen Farbakzent



Wie kann ich mit dem kostenlosen Konstruktionsprogramm SCHEINWORKS construction arbeiten?

Dies ist ganz einfach. Gehen Sie auf die Website unseres Programms www.scheinworks.construction.de und registrieren Sie sich. Wir prüfen Ihre Daten und schalten Ihren Zugang frei. Danach können Sie das System bequem und kostenlos für Ihre Bestellungen nutzen.

Funktioniert SCHEINWORKS construction auch mit „fremden“ Scansystemen?

JPG und PNG Daten von anderen Scansystemen können in unser Konstruktions-Programm SCHEINWORKS construction eingepflegt und als Grundlage für Ihre Konstruktion genutzt werden. Wichtig ist, die entsprechende Bildauflösung (dpi) im System einzutragen.

Weitere Information hierzu erhalten Sie im SCHEINWORKS construction Handbuch. Dies können Sie im SCHEINWORKS Programm herunterladen oder auch von uns als PDF zugeschickt bekommen.

Alternativ können Sie auch unsere Workshops in Remscheid besuchen:

www.schein.de/seminare



Wie kann ich das Programm am besten kennenlernen oder mich darin schulen lassen?

Per Seminar

Wir bieten kostenlose Workshops bei uns in Remscheid an. Bei einer begrenzten Anzahl von maximal zwölf Teilnehmern ist eine intensive Schulung möglich. Alle aktuellen Termine finden Sie immer auf www.schein.de/seminare

Über unseren Außendienst

Ihr zuständiger Außendienstmitarbeiter kann Sie bei Fragen zu unserem Programm vor Ort unterstützen.

Über unseren Innendienst

Darüber hinaus können Sie rund um SCHEINWORKS construction oder **Novaped exclusive** unseren Innendienst ansprechen. Sie erreichen ihn unter der Telefonnummer: +49 2191 910-193.

Über unser Handbuch

Wenn Sie sich bei SCHEINWORKS construction registriert haben, können Sie sich das Handbuch herunterladen, das Sie bei den Konstruktionsschritten unterstützt und das Programm Schritt für Schritt erklärt.



Wie sehen NovaPED exclusives aus?

Wenn man das wüsste? Jeder **NovaPED exclusive** Kunde ist gleichzeitig Genießer und Designer in einem.

Im Internet kann jeder unter www.schein-exclusive.de auf unseren Konfigurator zugreifen. Dort stellt sich Ihr Kunde sein Paar **NovaPED exclusive** nach eigenen Wünschen und persönlichem Geschmack zusammen.

Durch die enormen Kombinationsmöglichkeiten entstehen immer wieder neue Zusammensetzungen. Jeder Kunde erhält daher ein Unikat, das ganz auf seine Bedürfnisse abgestimmt ist.



Wie werde ich NovaPED exclusive Partner?

Indem Sie sich einfach bei uns im Marketing melden, per E-Mail an marketingmail@schein.de

Wir senden Ihnen dann ein Formular zu, das Sie uns mit den nötigen Daten versehen wieder zurückschicken. Damit tragen wir Sie auf unserer Website www.schein-exclusive.de als exclusive-Partner unter Ihrer Postleitzahl und mit Angabe Ihrer Kontaktdaten und Öffnungszeiten ein.

Was kostet mich ein Paar Zehensteigsandalen im Einkauf?

Auf Grund der vielfältigen Möglichkeiten, die unser Konfigurator bietet, kann das Grundmodell mit vielen Extras kombiniert werden.

Bitte fordern Sie unsere aktuelle Preisliste an, diese enthält den Einkaufspreis für das Grundmodell als auch für alle möglichen Extras.



Welche Riemenbreite gibt es?

Es muss zwischen einem breiten (ca. 2,5 cm) und schmalen (ca. 1,7cm) Riemen gewählt werden. Bis einschließlich Größe 39 kann nur der schmale Riemen bestellt werden. Ab Größe 40 können Sie das Riemen frei wählen.



Kann ich auch nur die Riemen einkaufen?

Ja, Sie können die Riemen auch paarweise ohne das Fußbett bestellen. Die Preise dazu finden Sie ebenfalls in unserer Preisliste.

Kann ich auch mein eigenes Logo an den Zehensteigsandalen anbringen lassen?

Die Riemen bekommen jeweils an den Außenseiten ein Schein-Logo-Fähnchen angenäht. Ab einer Mindestabnahmemenge von 1.000 Stück ist auch die Kennzeichnung mit firmeneigenen Fähnchen möglich. Die Kosten der Erstellung tragen Sie.

Die Preise hierfür erhalten Sie auf Anfrage.





NOVAPED exclusive

by schein



Handmade in Germany
www.schein-exclusive.de



03.0880.05.07.15



Germany since 1879

Schein Orthopädie Service KG
Hildegardstr. 5
42897 Remscheid
Germany
Tel. +49 2191 910-200
Fax +49 2191 910-100
E-Mail: info@schein.de
www.schein-exclusive.de



099990-511